







**GUÍA RÁPIDA DE USO – BASCULA DE GRÚA PARA TRASLADO Y PESAJE DE PACIENTES  
TEKVO BIOINGENIERÍA**

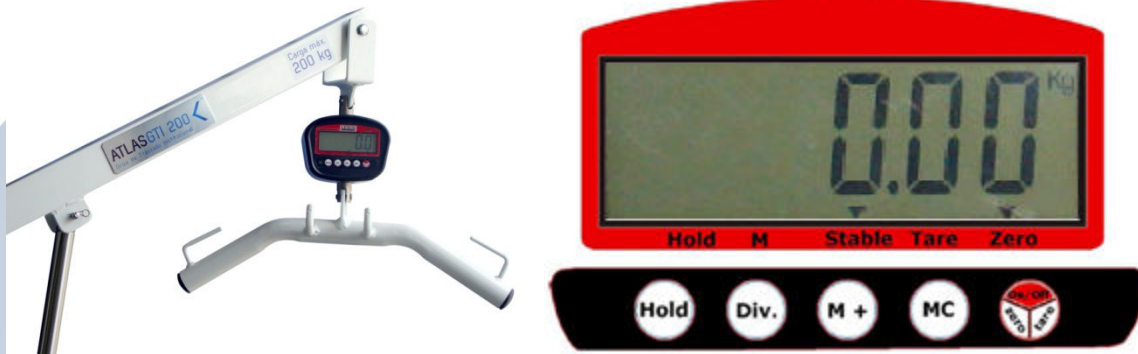

BOTÓN	FUNCIÓN	RECOMENDACIÓN DE USO
	<b>Encendido, Apagado, Cero y Tara</b> de la Báscula.	Indispensable. Encendido, Apagado, Cero y Tara de la Báscula.
	Borra el acumulado de las pesadas guardadas. (Tecla de acceso a ajuste de peso).	No usar
	Acumula el peso cuando se estabiliza y visualiza el peso total acumulado.	No usar
	Selección de la <b>división</b> . ( tecla de transferencia y selección)	Solo usar cuando se esté mostrando una cifra decimal después del punto. Usar con la finalidad de que se muestren dos cifras decimales y la medición del peso sea más exacta
	Tecla de Función y <b>congelado</b> del peso en pantalla.	Congela en pantalla el peso del paciente. Usar cuando el peso del paciente se haya estabilizado.

**INSTRUCCIONES DE USO**

1. Ubique el arnés al paciente. (arnés acostado o sentado)


2. ENCIENDA la báscula empleando el botón  sin haber ubicado en la percha las reatas del arnés



3. Cuelgue las reatas del arnés en la percha de la grúa. (Ver la siguiente imagen. espalda en laterales y piernas en el centro)



4. Eleve al paciente lo suficiente, (use la tecla “flecha hacia arriba” del control de la grúa) para que no quede ninguna parte de su cuerpo tocando la superficie de la cama

y presione la tecla  para “congelar” en pantalla el peso del paciente cuando este se estabilice. (Presione esta misma tecla para que la báscula vuelva a variar la lectura de la pantalla)



5. Por último si utilizó el arnés “acostado” reste 1.2kg al peso mostrado en la pantalla. Y si usó el arnés “sentado” reste 0.8kg al peso mostrado en pantalla