

GUÍA RÁPIDA DE USO GRÚA PARA TRASLADO Y PESAJE DE PACIENTES TEKVO BIOINGENIERÍA



INSTRUCCIONES DE USO

CARGA DE LA BATERÍA

Para recargar la batería, conecte el cable cargador que se ha suministrado con el equipo.

- ✓ Conéctelo primero del puerto señalado en las imágenes con el número uno (1) y posteriormente enchúfelo en el tomacorriente de la electricidad.
- ✓ Al conectar el cable de carga en el enchufe de la electricidad, se iluminarán los dos leds señalados en las imágenes con el número dos (2).
 - El led rotulado con la palabra “ON” indica que hay suministro de corriente. En caso de que el tomacorriente en el cual se ha conectado el equipo, no este suministrando corriente, este led no se encenderá.
 - El led rotulado con la palabra “CHARGE” indica el estado de carga de la batería. Este se encenderá en color naranja mientras la batería esté cargando y se apagará cuando la batería este completamente cargada.
- ✓ El led rotulado con la palabra “ON”, permanecerá encendido siempre que el cable de carga esté conectado a la electricidad, sin importar que la batería ya esté completamente cargada.
- ✓ La grúa no podrá ser operada mientras su cable de carga esté conectado; ya que por razones de seguridad eléctrica, esta se autobloquea, mientras está siendo cargada.
- ✓ Se recomienda que la grúa permanezca conectada, siempre que no esté siendo usada.

USO DE LA GRÚA

- ✓ Desconecte el cable de carga de sus dos extremos, teniendo especial cuidado de halarlo siempre desde los puntos más cercanos a los dos extremos conectados. Esto para evitar el deterioro de cable.

- ✓ Verifique que el botón de bloqueo de seguridad señalado en las imágenes con el número tres (3), no se encuentre presionado.
 - Para desactivar el bloqueo, gire el botón suavemente en el sentido que indican las flechas. Evitando halarlo ya que al halarlo podría dañarlo.
- ✓ Para elevar o descender el brazo de la grúa y realizar la elevación y descenso del paciente, presione los botones señalados en las imágenes con el número cuatro (4). Flecha que señala hacia arriba para elevar y flecha que señala hacia abajo para descender.

DESCENSO MANUAL

En caso de que por algún motivo, después de haber elevado al paciente, el brazo de la grúa no descienda. Hale hacia arriba el elemento señalado con el número cinco (5) en las figuras. Este accionará el descenso manual del brazo y del paciente. El descenso es lento y bajará al paciente hasta que el paciente toque la superficie de la cama o silla sobre la cual vaya a ubicarse.

- ✓ Solo utilice el descenso manual en caso de que la grúa no esté descendiendo al paciente mediante el empleo de la botonera.
- ✓ Antes de usar el descenso manual, verifique que el botón de bloqueo de seguridad, señalado con el número tres (3), no se encuentre presionado.

CHEQUEO DE NO-FUNCIONAMIENTO

Si la grúa no está elevando y descendiendo su brazo correctamente, proceda con los siguientes pasos:

- ✓ Conecte el cable de carga y deje que la batería cargue completamente, siguiendo los pasos descritos en “CARGA DE LA BATERÍA”.
- ✓ Siga los pasos descritos en “USO DE LA GRÚA”
- ✓ Si el brazo de la grúa aun no eleva o desciende. Suba y baje el desengrane de seguridad (Elemento rojo marcado con el número 5 en las imágenes).
- ✓ Si el brazo de la grúa aun no eleva o desciende. Desconecte y conecte nuevamente con fuerza los cables de la botonera y del actuador. Puntos situados al lado del puerto del cable de carga, señalado en las imágenes con el número uno (1). Esto con el fin de verificar que los cables estén haciendo buen “contacto”.
- ✓ Si la grúa continua sin elevar o descender el brazo, realice la limpieza de los contactos de la batería. Siguiendo los pasos descritos en el documento “LIMPIEZA DE BATERÍA”

En caso de requerir información adicional, contáctese con nuestro personal de ingeniería en el siguiente teléfono móvil:

ingeniería@tekvobioingeniería.com

3007893822