


PROTOCOLO DE LIMPIEZA
GRÚAS PARA TRASLADO Y PESAJE DE PACIENTES
ATLAS GTI DE TEKVO BIOINGENIERÍA

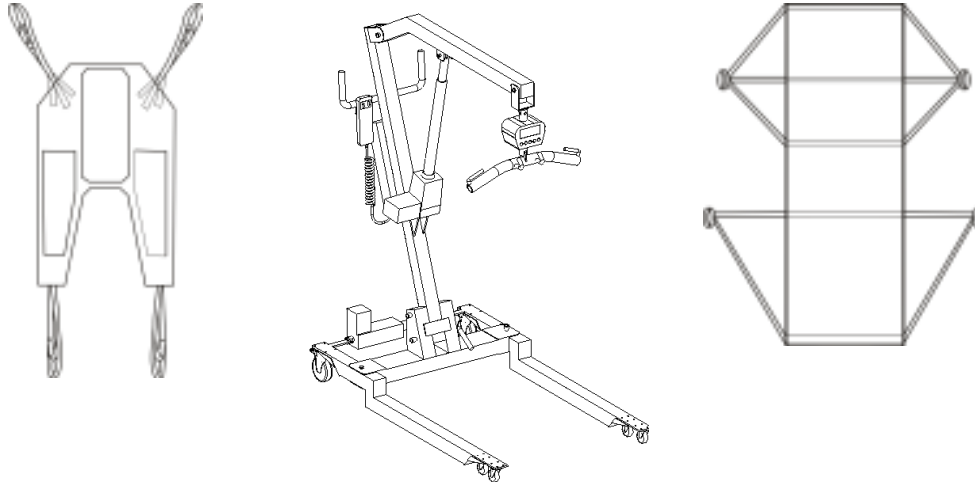

A. LIMPIEZA DE LAS GRÚAS

- ✓ Limpiar con agua y jabón corriente, y/o cualquier desinfectante para superficies duras.
- ✓ Evitar el uso de productos de limpieza agresivos o abrasivos, ya que podrían dañar el acabado de la superficie.
- ✓ Limpiar con un trapo blanco humedecido y bien escurrido. **Nunca** limpiar con agua en abundancia.
- ✓ Evitar que los componentes eléctricos entren en contacto con el agua.

B. INSTRUCCIONES DE LAVADO DE LOS ARNESES

- ✓ Lavar en solución con jabón suave a temperatura no mayor de 71°C.
- ✓ Secar en una habitación templada, al aire libre ó al sol.
- ✓ No colocar cerca de calentadores por convección ni tuberías de vapor.
- ✓ Debido a que en su interior algunos arneses poseen una espuma plástica, los arneses deben secarse completamente para garantizar la completa evaporación de la humedad.